



DAX Ytdesinfektion 75+

Ytdesinfektion



DAX Ytdesinfektion 75+ är avsedd för desinfektion av släta ytor t.ex. bänkar, bord och undersökningsbritsar. Den är effektiv mot bakterier, svampar och olika typer av virus som coronavirus, HIV, Hepatit B och C samt vissa nakna virus som Adenovirus och Murine Norovirus. Produkten verkar snabbt och effektivt utan att lämna spår på den behandlade ytan.

Mikrobiologisk information:

EN13727 (baktericidal effekt) 30 sek

EN13697 (baktericidal effekt) 5 min

EN13624 (jästicidal effekt) 30 sek, (fungicidal effekt) 15 min

EN13697 (jästicidal effekt) 60 sek

EN14476 (höljeförsedda virus, Adenovirus, Murine Norovirus) 30 sek

EN14348 (M. Avium) 60 sek

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Användningsområde	Lämplig för ytdesinfektion inom hälso- och sjukvården, tandvården eller djursjukvården.	
Produktegenskaper	75 volymprocent alkoholstyrka, med etanol som huvudkomponent Verkar snabbt och effektivt utan att lämna spår på den behandlade ytan Innehåller tensid, vilket gör att ytan inte behöver förbehandlas Har dokumenterad effekt på bakterier, svampar och flera olika virus som t.ex. Corona, HIV, Murine Norovirus och Adenovirus.	
Bruksanvisning	Används på ytor som tål alkohol. DAX Ytdesinfektion 75+ innehåller tensid vilket gör att ytan inte behöver rengöras först. Är ytan väldigt smutsig eller har mycket intorkat blod rekommenderas dock rengöring med vanligt rengöringsmedel först. Gör så här: 1. Spruta rikligt på ytan alternativt dränk in en torkduk med utspädd vätska. 2. Bearbeta ytan upprepade gånger under minst 30 sek (se produktblad för kontakttider) 3. Lämna ytan att lufttorka	
Sammansättning	Aktiva ämen	Effekt
	Etanol	75vol% med tensid
Förvaring	Förvaras i rumstemperatur, stäng kapsylen efter användning. Hållbar 3 år från produktion.	

Tillverkningsland

SVERIGE

Förpackningsvolym /
Artikelnr.

Artikelnr.

GTIN

GTIN (krt)

12 x 1 l

495-12

7331964004951

7331964904954

3 x 4 l

496-3

7331964004968

1 x 10 l

497-1

7331964004975

24 x 300 ml

494-24

7331964004944

7331964904947

Ytterligare
information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.